

## PRINCIPE D'ACTION

### BV SPORT®

Elimination des TOXINES



## LA MISE EN PLACE DU BV SPORT®

doit respecter les contraintes élastiques du textile. Pour une EFFICACITÉ OPTIMALE, nous vous conseillons de procéder de la manière suivante :

- Présentez le **BV SPORT®** selon la Fig.1.



- Enfilez le pied en faisant coïncider votre talon avec celui de la chaussette puis faites glisser **BV SPORT®** au dessus de la cheville (Fig.2 et 3).



- Faites remonter progressivement le **BV SPORT®** jusqu'au dessous du genou **SANS LAISSER DE PLUS** (Fig.4).



- Fig.4 et 5 : BON POSITIONNEMENT. **TROP TIRER SUR LE BV SPORT® MODIFIE SON BON POSITIONNEMENT ET NUIT À SON EFFICACITÉ.**

### CONTRE INDICATION :

- Maladie des artères, veines et lymphatiques des membres inférieurs.
- Dermatoses suintantes et infectieuses, plaies ou ulcères cutanés.
- Allergie aux matières constitutives de **BV SPORT®** (coton, lycra, polyamide...).

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- En cas de fourmillements, crampes ou douleurs au niveau de la jambe ou du pied, vous devez retirer **BV SPORT®** et consulter votre médecin.
- Toute gêne survenant pendant l'effort nécessite de retirer ou de baisser le BOOSTER.
- **BV SPORT®** ne doit pas se substituer au bas et collant de contention pour maladies veineuses.
- Ne pas porter **BV SPORT®** la nuit.

**TAILLES** Les prises de mesure et les tailles sont propres à l'utilisateur et doivent être IMPÉRATIVEMENT respectées.

### ENTRETIEN :

**BV SPORT®** doit être lavé à la main à l'eau tiède savonneuse ou en machine à laver sans lessive détergente (maximum 40°C). Il doit être séché à plat, loin d'une source de chaleur (ni radiateur, ni sèche linge). Laver le **BV SPORT®**, lui permet de retrouver ses propriétés textiles et son efficacité.

# Gamme PRORECUPI

Réalisée avec un tricotage spécifique et des pressions calculées sur des sportifs de haut niveau, cette chaussette est optimisée pour la récupération. Elle doit être portée au moins pendant 2 heures après chaque effort (entraînement, match, et compétition). **PRORECUPI** est le complément indispensable des autres techniques de récupération en prolongeant leurs effets bénéfiques (massages, étirements, électrostimulation, pressothérapie...)

## LES "PLUS" BV SPORT®

### LA RÉCUPÉRATION

L'effet COMPRESSION spécifique **BV SPORT®** va purger rapidement le mollet de toutes ses toxines (acide lactique, radicaux libres, CO2...)

### LA PERFORMANCE

L'effet CONTENTION (OU APONÉVROSE) par ses pressions adaptées au mollet permet une meilleure oxygénation et un meilleur rendement musculaire à l'effort.

### PORTÉ RÉGULIÈREMENT

Le concept **BV SPORT®** réduit le RISQUE DE BLESSURE (tendinites, claquages...)

## Contention PROGRESSIVE

### Brevet



Le Centre de Recherche et Développement de la société BV SPORT® dirige ses travaux sur le comportement des vaisseaux (artères et veines) chez le sportif. Le MOLLET représente un organe cible car il se comporte comme un COEUR PÉRIPHÉRIQUE. Pour se rapprocher au plus près de toutes les morphologies et apporter un maximum de CONFORT et d'EFFICACITÉ, nous proposons 13 TAILLES par gamme. Dans certains cas les BV SPORT peuvent être réalisés sur MESURES ANATOMIQUES et des PRESSIONS VEINEUSES MUSCULAIRES. (cf site : www.bvsport.com)

## NOUVEAU CONCEPT DE CONTENTION - COMPRESSION UNIQUE AU MONDE (Brevets BV SPORT®)



Accélère la récupération

Améliore la performance

Réduit le risque de blessure

(Si porté régulièrement)

Utilisé par plus de 2500 athlètes de haut niveau dont 230 champions du monde et champions olympiques



### INFORMATIONS - CONTACTS :

BV SPORT - 104, rue BERGSSON - 42000 SAINT-ETIENNE - Tél. : 04 77 52 11 47 - Fax : 04 77 57 28 40

www.bvsport.com



## Boost your performances

## BV SPORT® LA RÉFÉRENCE DANS LA CONTENTION DU SPORTIF

**BV SPORT®** se différencie de la contention traditionnelle (dégressive) par : des **PRESSIONS ADAPTÉES AU MOLLET** et des pressions faibles ou nulles à la cheville

### VALIDATIONS

- **DES ÉTUDES CLINIQUES** - Publiées et présentées dans des congrès internationaux
- **DES TECHNIQUES INTRA-MOYENNES** - Echo-doppler couleur réalisé avec brassard spécifique® - I.R.M.



Clairefontaine Euro 2000



BRASSARD À TENSION AMPVE®



EFFET APONÉVROSE DE LA CONTENTION BV SPORT® en I.R.M.

Gamme PRORECUPI

Boostez vos performances

